

Doporučení k praní, čištění pláště

Zaplněnost pračky: 70 % uvedeného zatížení

Uvedené specifikace jsou doporučené. Než je zavedete do praxe, kontaktujte svého dodavatele prac. prostředků kvůli přesnému dávkování.

	Čas (min.)	Teplota	Úroveň vody	Produkty
Namáčení	2	Studená voda	Střední	
Předpírka	6	40–45 °C	Střední	Prací prostředek pro předpírku
Hlavní praní	10	60/70 °C	Nízká	Prací prostředek pro hlavní praní
1. máchání	3	30 °C	Vysoká	
2. máchání	3	30 °C	Vysoká	
3. máchání	3	Studená voda	Vysoká	
Neutralizace	1	Studená voda	Vysoká	

	Čas (min.)	Teplota	Ostatní
Sušení	7–8	85–90 °C	Ochlazení 2 minuty

Stačí minimální množství pracího prostředku. Tato tkanina se snadno vypere. Obzvláště důležitá je fáze máchání. Pro předpírku doporučujeme větší množství pracího prostředku, pro hlavní praní nižší množství. Usnadní se tak neutralizace tkaniny během máchání.

Aby byly technické vlastnosti tkaniny zachovány co nejdéle, doporučujeme zcela odstranit (neutralizovat) případné zbytky pracích prostředků a zásad.

Zbytky pracích prostředků a mýdel způsobují předčasné stárnutí vláken.

- ! **Nepoužívejte žádné aviváže, bělidla nebo baktericidní,
• fungicidní přípravky a podobné produkty.**

