


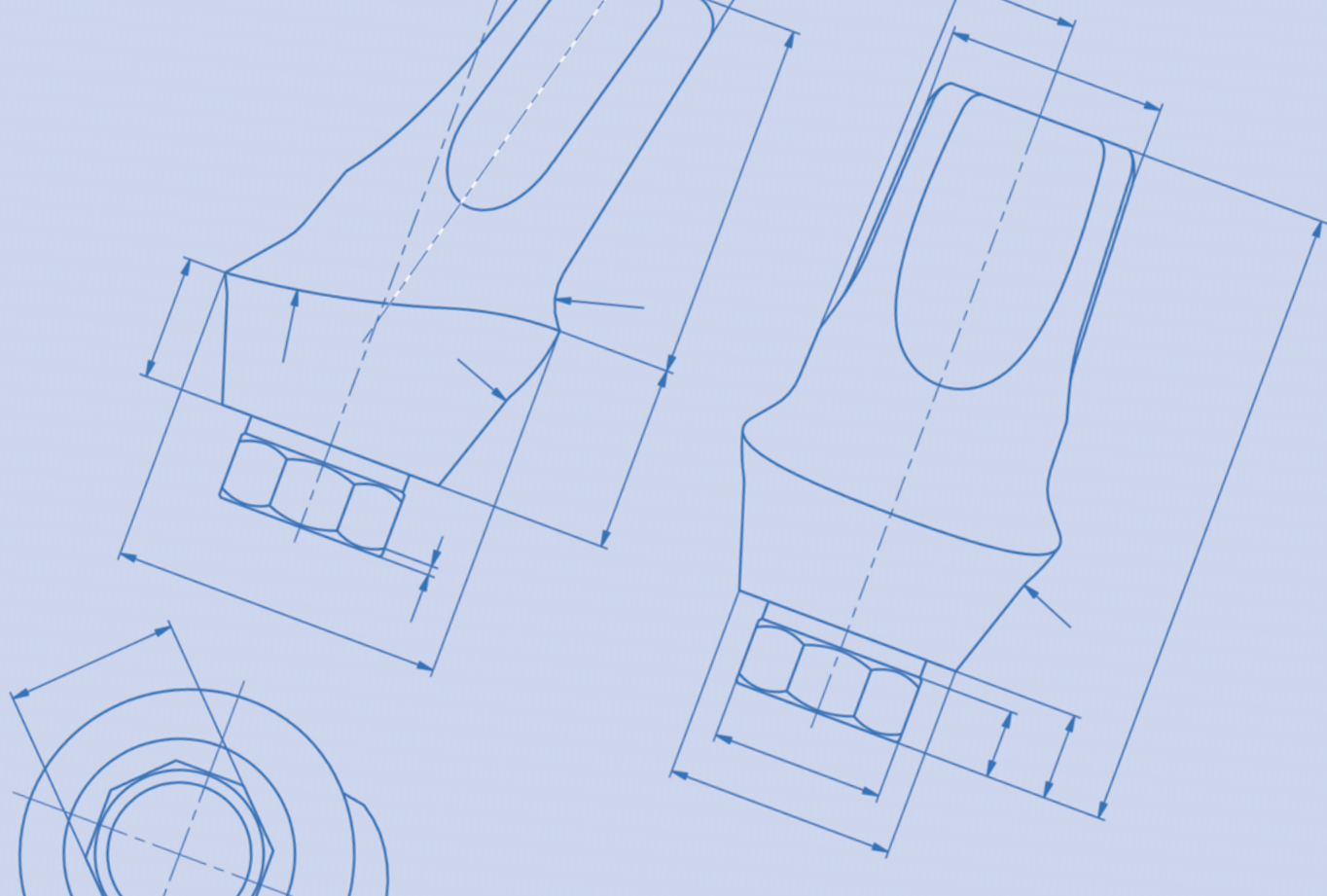

IMPLADENT®


Přehled protetických komponent



PROTETICKÝ PŘEHLED

	Protetická řada 2.9 kompatibilní s implantáty D2.9	Protetická řada 3.7 kompatibilní s implantáty D3.7, D4.4, D5.1, D5.6		Manipulační implantát / Poznámka
Provizorní	pro provizorní práce D2.9/d3.7 L1 – 0165.3 L3 – 0365.3 pro provizorní práce bez 8hranu D2.9/d3.7 L1 – 1165.3 L3 – 1365.3	pro provizorní práce D3.7/d4.8 L1 – 1055.3 L3 – 1255.3 pro provizorní práce bez 8hranu D3.7/d4.8 L1 – 1455.3 L3 – 1655.3 pro provizorní práce PEEK D3.7/d4.8 L1 – 01055.3 L3 – 01255.3 PEEK bez 8hranu D3.7/d4.8 L1 – 01455.3 L3 – 01655.3		Individuálně upravený pilíř pro provizorní práci nebo pilíř s provizorní korunkou lze použít místo vhojovacího válečku pro anatomicky optimální modelaci měkké tkáně. Fixační šroub dodávaný k PEEK pilířům je nezaměnitelný.
Cementované	STANDARD angulovaný 15° D2.9/d3.7 L1 – 1102.3 L2 – 2102.3 L3 – 3102.3 L4 – 4102.3 angulovaný 25° D2.9/d3.7 L1 – 1112.3 L2 – 2112.3 L3 – 3112.3 L4 – 4112.3 PLUS přímý D2.9/d3.8 L1 – 1121.01 L2 – 1121.02 L4 – 1121.04 PLUS přímý D2.9/d4.4 L1 – 615252 L2 – 625252 L4 – 645252 angulovaný 15° D2.9/d3.8 L1 – 1122.01 L2 – 1122.02 L4 – 1122.04 angulovaný 15° D2.9/d4.4 L1 – 615192 L2 – 625192 L4 – 645192 angulovaný 25° D2.9/d4.4 L1 – 615202 L2 – 625202 L4 – 645202	STANDARD přímý D3.7/d4.8 L1 – 1132.3 L2 – 2132.3 L3 – 3132.3 L4 – 4132.3 angulovaný 15° D3.7/d4.8 L1 – 1142.3 L2 – 2142.3 L3 – 3142.3 L4 – 4142.3 angulovaný 25° D3.7/d4.8 L1 – 1152.3 L2 – 2152.3 L3 – 3152.3 L4 – 4152.3 PLUS přímý D3.7/d4.0 L1 – 15252 L2 – 25252 L4 – 45252 PLUS přímý D3.7/d5.4 L1 – 515252 L2 – 525252 L4 – 545252 angulovaný 15° D3.7/d4.0 L1 – 15192 L2 – 25192 L4 – 45192 angulovaný 15° D3.7/d5.4 L1 – 515192 L2 – 525192 L4 – 545192 angulovaný 25° D3.7/d4.0 L1 – 15202 L2 – 25202 L4 – 45202 angulovaný 25° D3.7/d5.4 L1 – 515202 L2 – 525202 L4 – 545202		Fixační šroub dodávaný k PEEK pilířům je nezaměnitelný. Spalitelná kapna se namodeluje individuálně na originální estetický PLUS pilíř.
Šroubované	pro šroubované náhrady D2.9/d3.7 L1 – 30042.3 L2 – 31042.3 L3 – 32042.3 L4 – 33042.3 pro šroubované náhrady angulovaný D2.9/25° L2 – 130202 L3 – 140202 L4 – 150202	pro šroubované náhrady D3.7/d3.7 L1 – 10042.3 L2 – 11042.3 L3 – 12042.3 L4 – 13042.3 pro šroubované náhrady D3.7/d4.8 L1 – 20042.3 L2 – 21042.3 L3 – 22042.3 L4 – 23042.3 pro šroubované náhrady angulovaný D3.7/25° L2 – 230202 L3 – 240202 L4 – 250202 TS pilíř – 70° L1/H2.0 – 116.3 L2/H2.0 – 126.3 L3/H2.0 – 136.3 L1/H2.5 – 216.3 L2/H2.5 – 226.3 L3/H2.5 – 236.3 L1/H3.0 – 316.3 L2/H3.0 – 326.3 L3/H3.0 – 336.3 TS pilíř – 65° L1/H2.0 – 416.3 L2/H2.0 – 426.3 L3/H2.0 – 436.3 L1/H2.5 – 516.3 L2/H2.5 – 526.3 L3/H2.5 – 536.3 L1/H3.0 – 616.3 L2/H3.0 – 626.3 L3/H3.0 – 636.3		Transverzální šroubky se nabízejí ve čtyřech různých délkách.
Hybridní	Kulový attachment D2.9/d3.7 L1 – 55432.3 L2 – 56432.3 L3 – 57432.3 L4 – 58432.3 L6 – 60432.3	Attachment LOCATOR D3.7 L0 – 01207 L1 – 01208 L2 – 01209 L3 – 01210 L4 – 01211 L5 – 01212 Kulový attachment D3.7/d3.7 L1 – 21432.3 L2 – 22432.3 L3 – 23432.3 L4 – 24432.3 L6 – 26432.3		08530 (4 ks) CAP CLASSIC 6932.3 7932.3 CLASSIC Plus 055752 055890

Lze použít pro všechny pilíře


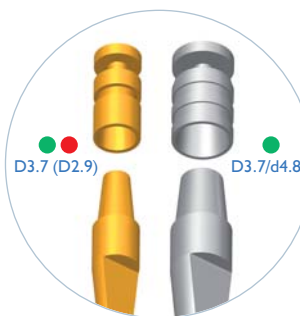


Pro upevnění finální práce se používá nový fixační šroub. Utahovací moment fixačních šroubů pilířů je 35 Ncm. Utahovací moment fixačních šroubů PEEK pilířů pro provizorní práce je 20 Ncm. Utahovací moment šroubů pro fixaci konstrukce a transverzálních šroubků je 15 Ncm.

Pilíř není vhodný pro ošetření solo náhrady.

Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce

OTISKOVACÍ PŘEHLED

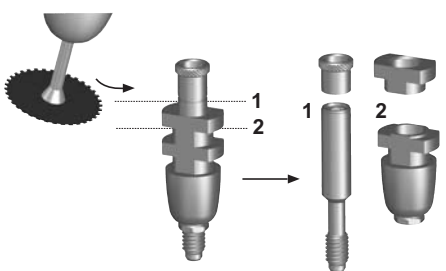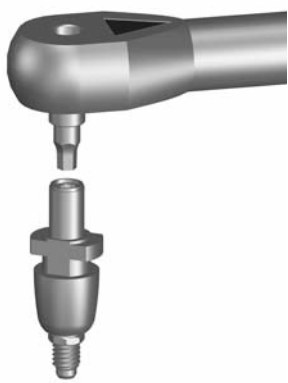Pilíř	Vhojovací váleček	Otiskování	Poznámky
Protetická řada 3.7 kompatibilní s implantáty D3.7, D4.4, D5.1, D5.6	 Pro provizorní práce D3.7/d4.8	 Otiskovací člen pro otevřenou metodu 533.3	Vhojovací válečky a otiskovací členy se utahují ručním intraorálním šroubovákem. Před utažením přidržovacího pinu se ujistěte o správném dosednutí otiskovacího členu na vnitřní osmihran implantátu. Utáhněte pin ručním intraorálním šroubovákem. V případě pochybností proveďte rentgenografickou kontrolu.  V případě nutnosti lze zkrátit přidržovací pin (1), či tělo otiskovacího členu (2). Při zkracování přidržovacího pinu je nutné zachovat dostatečnou retenci.  V případě nedostatku okluzálního prostoru použijte extrakrátký šroubovák do ráčny a opatrně utáhněte přidržovací pin. Přidržovací pin musí být zkrácen – viz výše. Alternativní metody otiskování najdete v katalogu.
	 Estetický PLUS D3.7/d5.4	 široký D3.7/d5.2 L2 – 622.3 L4 – 822.3 L6 – 3722.3	
	 STANDARD D3.7/d4.8	 široký D3.7/d5.2 L2 – 622.3 L4 – 822.3 L6 – 3722.3	
	 TS pilíř D3.7/d5.0	 široký D3.7/d5.2 L2 – 622.3 L4 – 822.3 L6 – 3722.3	
	 Pro šroubované náhrady D3.7	 široký D3.7/d5.2 L2 – 622.3 L4 – 822.3 L6 – 3722.3	
	 STANDARD D3.7/d3.7	 široký D3.7/d5.2 L2 – 622.3 L4 – 822.3 L6 – 3722.3	
	 Kulový attachment D3.7/d3.7	 široký D3.7/d5.2 L2 – 622.3 L4 – 822.3 L6 – 3722.3	
	 Attachment LOCATOR D3.7	 široký D3.7/d5.2 L2 – 622.3 L4 – 822.3 L6 – 3722.3	
Protetická řada 2.9 kompatibilní s implantáty D2.9	 Estetický PLUS D2.9/d4.4	 Otiskovací člen pro otevřenou metodu široký D2.9/d4.5 1233.3	
	 STANDARD D2.9/d3.7	 široký D2.9/d4.7 L2 – 3122.3 L4 – 3322.3 L6 – 3522.3	
	 Kulový attachment D2.9/d3.7	 široký D2.9/d4.7 L2 – 3122.3 L4 – 3322.3 L6 – 3522.3	
	 Pro šroubované náhrady D2.9	 široký D2.9/d4.7 L2 – 3122.3 L4 – 3322.3 L6 – 3522.3	
	 Pro šroubované náhrady D2.9	 široký D2.9/d4.7 L2 – 3122.3 L4 – 3322.3 L6 – 3522.3	